

Nome Dispositivo:	RINOIALO SPRAY
Codice Prodotto	DMS18
Fascicolo Tecnico:	TF FITOIALO SPRAY IIA
Classificazione:	CLASSE IIa
Descrizione prodotto:	<p>SPRAY NASALE</p> <p>Dispositivo medico non sterile appartenente alla classe IIa, secondo quanto disposto dalla regola 4, allegato IX della Normativa CEE 93/42 del 14-06.93 recepita con DL.vo del 24-02-97 , n. 46 e successive modificazioni.</p>
Descrizione confezionamento	
Primario	No-gas Spray 50 ml
Secondario	Astuccio di cartone litografato con foglietto illustrativo.
Composizione:	Il facone contiene: Acqua di Mare, Acido ialuronico, Estratto glicerico di semi di pompelmo, Estratto idroglicerico di Echinacea, Estratto idroglicerico di Drosera, Estratto idroglicerico di Timo Serpillo, Potassio Fosfato Bibasico, Potassio Fosfato Monobasico, Sodio cloruro, Acqua.
Destinazione d'uso	<p>Dispositivo medico a base di estratti vegetali ed acqua di mare in soluzione ipertonica indicato per il trattamento dei sintomi di raffreddore e sinusite.</p> <p>Il prodotto è una soluzione che, con presenza di acqua di mare in soluzione ipertonica, favorisce il lavaggio della fossa nasale con una efficace rimozione delle secrezioni nasali.</p> <p>La presenza di Acido ialuronico favorisce idratazione profonda della mucosa nasale, esercitando al contempo un'azione protettiva con un effetto barriera che protegge la mucosa nasale.</p> <p>Estratti glicerici di semi di Pompelmo, Echinacea, Drosera e Timo serpillo: piante note per le loro azioni benefiche a livello delle mucose delle alte vie aeree, contribuiscono al naturale benessere fisiologico della mucosa favorendo la sua idratazione e la compliance del prodotto.</p> <p>RINOIALO è stato formulato senza conservanti aggiunti, grazie al particolare packaging "Senza Conservanti" che consente la totale protezione del prodotto da contaminazione batterica dal primo all'ultimo utilizzo.</p> <p>RINOIALO non contiene decongestionanti vasocostrittori, non crea assuefazione. È adatto ad un uso frequente.</p> <p>Erogatore Preservative Free che permette di evitare l'utilizzo di conservanti aggiunti che potrebbero causare reazioni allergiche a contatto con la mucosa nasale.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coadiuvante nel trattamento dei sintomi del raffreddore e sinusite. - Protezione e idratazione della mucosa nasale. - Ripristino delle condizioni fisiologiche nasali.
Utilizzo:	Al bisogno, togliere il cappuccio protettivo, e, dopo aver soffiato delicatamente il naso, inserire l'erogatore in una narice e spruzzare per 1-2 volte consecutive; fare altrettanto nell'altra narice. L'applicazione può essere ripetuta per 4-5 volte nell'arco della giornata facendo attenzione a non spruzzare negli occhi o in bocca. È preferibile lavare l'erogatore al termine dell'utilizzo.



experience &
evolution



Development Manufacturing Marketing
Food supplements Cosmetics Medical devices



SCHEDA TECNICA RINOIALO SPRAY

REV 0 del 02/03/2020

Conservazione:	Conservare a temperatura ambiente lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato.
Manipolazione:	Non sono previste particolari precauzioni per la manipolazione del prodotto, le istruzioni di utilizzo sono sufficienti per un uso sicuro e corretto del prodotto.
Precauzioni di utilizzo:	AVVERTENZE <ul style="list-style-type: none">- Il prodotto è per uso nasale. Non usare in caso di ipersensibilità e di incompatibilità verso qualsiasi componente del prodotto.- Può essere utilizzato nei bambini a partire dai 3 anni di età, con l'ausilio di una persona adulta.- Tenere il prodotto fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.- L'uso prolungato del prodotto, come per tutti i prodotti topici, può dar luogo a fenomeni di sensibilizzazione o irritazioni locali, ove ciò accada, interrompere il trattamento e consultare il proprio medico curante o il farmacista.- Non utilizzare il prodotto se la confezione, al momento della prima apertura, risultasse danneggiata o non perfettamente integra.- Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
Controindicazioni e interazioni:	Non sono noti effetti collaterali correlati all'utilizzo del prodotto. In caso di comparsa di effetti collaterali consultare il Medico.
Modalità di Smaltimento:	Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.
Caratteristiche Tecniche:	Il dispositivo medico in oggetto è costituito da uno spray nasale che non deve soddisfare i criteri di sterilità.
Periodo massimo di utilizzo:	36 mesi